

Kaip naudoti GLP-1 RA FlexTouch® švirkštiklį

Daugiau informacijos galite rasti

MANOSVORIS.LT



Medžiaga skirta pacientų mokymui

*Dėl papildomos informacijos, kaip naudoti FlexTouch® švirkštiklį,
kreipkitės į gydytoją, slaugytoją ar vaistininką.*

Kaip naudoti švirkštiklį FlexTouch®?

A Švirkštiklio dangtelis

Kaskart panaudoję švirkštiklį, uždėkite dangtelį, kad tirpalas būtų apsaugotas nuo šviesos.

B Švirkštiklio langelis

Langelyje patikrinkite, ar švirkštiklyje esantis tirpalas yra skaidrus ir bespalvis.

C Dozės langelis


Rodo parinktą dozę.

D Dozės parinkiklis

Sukant parinkite reikiamą dozę.

E Dozės mygtukas

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį paspaudę, kol dozės langelyje bus rodomas skaičius „0“ ir lėtai suskaičiuosite iki 6. Atleiskite dozavimo mygtuką tik ištraukus švirkštiklį iš odos.

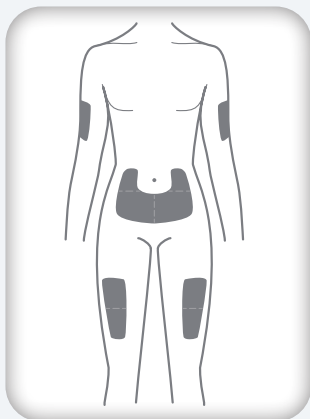


REKOMENDUOJAMOS INJEKCIJOS VIETOS

- Pilvo sritis (vaistai neleidžiami aplink bambą dviejų pirštų (~4 cm) atstumu)
- Žasto sritis
- Šlaunų sritis

Rekomenduojama reguliariai keisti vaistų leidimo vietas.

Injekcijos vietos gali skirtis priklausomai nuo vaisto. Kur geriausia susileisti Jums paskirtą vaistą, pasitarkite su gydytoju, slaugytoju ar vaistininku.

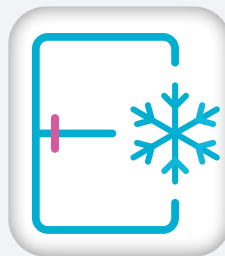

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti **šaldytuve** (2 °C–8 °C), toliau nuo šaldymo elemento. Jei švirkštiklis buvo užšalęs, vartoti negalima.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Atidarius švirkštiklį galima laikyti ne šaldytuve iki 6 savaičių ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Injekcijos žingsniai



1 Paruoškite švirkštiklį, uždėkite naują adatą

Patikrinkite vaisto pavadinimą ir spalvotą etiketę - įsitinkinkite, kad tai Jums paskirtas vaistas ir dozė. Patikrinkite, ar švirkštiklyje esantis tirpalas yra skaidrus ir bespalvis.

Uždėkite adatą tiesiai ant švirkštiklio. Tvirtai prisukite.

Nuimkite išorinį ir vidinį adatos dangtelius.



2 Tekėjimo patikrinimas

Prieš leisdami pirmą injekciją nauju švirkštikliu, visada patikrinkite ištekėjimą: sukite dozės parinkiklį tol, kol ištekėjimo patikrinimo simbolis susilygiuos su rodykle (→). Laikykite švirkštiklį aukšty n nukreipta adata. Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį paspaudę, kol dozės langelyje vėl bus rodomas skaičius „0“. Ant adatos galo turi pasirodyti tirpalo lašas.




3 Dozės pasirinkimas

Sukite dozės parinkiklį, kad pasirinktumėte Jums paskirtą dozę. Sukite tol, kol dozės langelis sustos ties Jums paskirta doze.



4 Leidimas

Įdurdite adatą po oda, paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį paspaudę, kol dozės langelyje bus rodomas skaičius „0“ ir lėtai suskaičiuosite iki 6. Atleiskite dozavimo mygtuką tik ištraukus švirkštiklį iš odos.

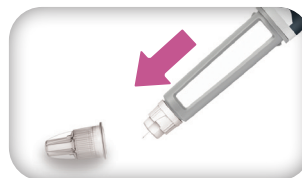

5 Po injekcijos

Uždėkite išorinį adatos dangtelį. Nusukite adatą ir atsargiai ją išmeskite. Kaskart panaudoję švirkštiklį, uždėkite švirkštiklio dangtelį, kad tirpalas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Dažnai užduodami klausimai

Ką daryti, jei tikrinant švirkštiklio tekėjimą nepasirodė lašas?

Jei lašas nepasirodo, pakartokite tekėjimo patikrinimą daugiausia 2 kartus. Jei lašas vis dar nepasirodo, pakeiskite adatą ir dar kartą pakartokite tekėjimo patikrinimą.

Jei lašas vis dar nepasirodo, naudokite naują švirkštiklį.

Jeigu lašas nepasirodo, vaisto nesuleisite, net jei dozės langelyje skaičiai keisis. Tai gali reikšti, kad adata užsikimšusi ar pažeista. Kiekvienai injekcijai naudokite naują adatą. Tai sumažins adatų užsikimšimo, užteršimo, infekcijos ir netikslaus dozavimo riziką. Niekada nenaudokite sulenktos ar pažeistos adatos.

Ką daryti, jei tirpalas FlexTouch® švirkštiklyje atrodo neskaidrus ar drumstas?

Jeigu tirpalas atrodo drumstas ar pasikeitusi jo spalva, švirkštiklio nenaudokite.

Ką daryti, jei po adatos ištraukimo injekcijos vietoje pasirodė kraujas?

Kartais taip pasitaiko. Jeigu injekcijos vietoje pasirodo kraujas, lengvai jį užspauskite. Injekcijos vietos netrinkite. Taip pat po injekcijos ant adatos galo gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai yra normalu ir neturi jokio poveikio dozei, kurią suleidote.

Kaip žinoti, kiek liko tirpalo?

Jei norite sužinoti, kiek tiksliai liko tirpalo, naudokite dozės langelį. Sukite dozės parinkiklį tol, kol skaičiai dozės langelyje nebesisuks. Jei langelyje rodoma Jums paskirta dozė, tai reiškia Jūsų švirkštiklyje liko bent viena Jums reikalinga dozė.

Jei dozės langelyje skaičius sustoja prieš Jums paskirtą dozę, reiškia, kad visai dozei neliko pakankamo tirpalo kiekio. Naudokite naują švirkštiklį.

SVARBU!

- Pavartojus per didelę dozę, patyrus šalutinių poveikių - nedelsdami praneškite gydytojui.
- Nenaudokite švirkštiklio, kol Jūsų neišmokė gydytojas arba slaugytojas.
- Nerekomenduojama leidimo vietos dezinfekuoti ir masažuoti po injekcijos.
- Jei esate aklas ar Jūsų regėjimas prastas ir negalite perskaityti, kas rašoma ant švirkštiklio esančiame dozės langelyje, nenaudokite švirkštiklio be gerai reginčio asmens pagalbos, išmokyto naudotis švirkštikliu.

UAB „Novo Nordisk Pharma“.

J.Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius.

Nemokamas informacijos tel. 8-800 21 222.

www.novonordisk.lt. © Novo Nordisk® LT25FT00006